



**뮤코라신** - 임플란트 후엔 뮤코라신!

# MUCORASIN MOUTH ULCER SPRAY



[  
염증 예방  
통증 조절  
상처 보호  
]

(주)이노트 - 의료기기 전문기업

Beyond, Medical Device.



실비보험  
적용가능

# MUCORASIN

MOUTH ULCER SPRAY

## 임플란트 후엔 무코라신!

## 무코라신 점착성투명창상피복재



무코라신은 스프레이 방식으로 구강 등, 점막에 얇은 보호막을 형성하여 습윤 환경을 만들어 상처를 아물게 하며, 염증을 예방합니다. 또한, 외부 자극에 의한 통증을 줄이고, 상처를 보호합니다.



### 특장점

- 점막 도포로 자극이 없이 자연치유가 된다.
- 보호막을 형성하여 통증을 감소시켜 음식물 섭취 가능
- 빠른 작용(1minute pain relief) 및 장시간 효과 (5-7시간)
- 높은 생체접착성을 갖고 있으며 얇은 보호막을 형성하여 구강 점막의 수분 증가
- 매끄러운 카테터를 사용하여 임상적 투여경로와 일치
- 점막 상처의 염증을 예방하고 외부자극으로 인한 통증을 조절하고 상처를 보호

### 적용범위

- 임플란트 수술후 봉합부위 염증예방
- 임플란트 수술후 봉합부위 통증조절
- 임플란트 수술후 봉합부위 보호막형성 후 상처보호
- 사랑니 발치후 상처부위 보호
- 교정기 사용으로 인한 구강내 상처부위 통증완화
- 구내염 및 구강내 상처보호

점막 상처의 염증을 예방하고 외부자극으로 인한 통증을 조절하며 상처를 보호합니다.



# 뮤코라신 성분

정제수

Purified water  
점도와 성분비를 조절

폴리바이닐  
피롤리돈  
K-90

Polyvinyl Pyrrolidone  
생체 접착성이 높으며 보호막 형성

칼슘  
클로라이드

Calcium chloride  
폴리바이닐의 코팅강화


프로필렌  
글리콜

Propylene glycol  
점액과 잘 섞이게하여  
깨끗한 상태로 코팅

# 뮤코라신 MUCORASIN MOUTH ULCER SPRAY

## 사용방법

투명 캡을 앞으로 당겨 본체와 분리시킨다. 상처부위에 용기상단을 눌러 분사량을 조절하며 상처부위에 도포한다.

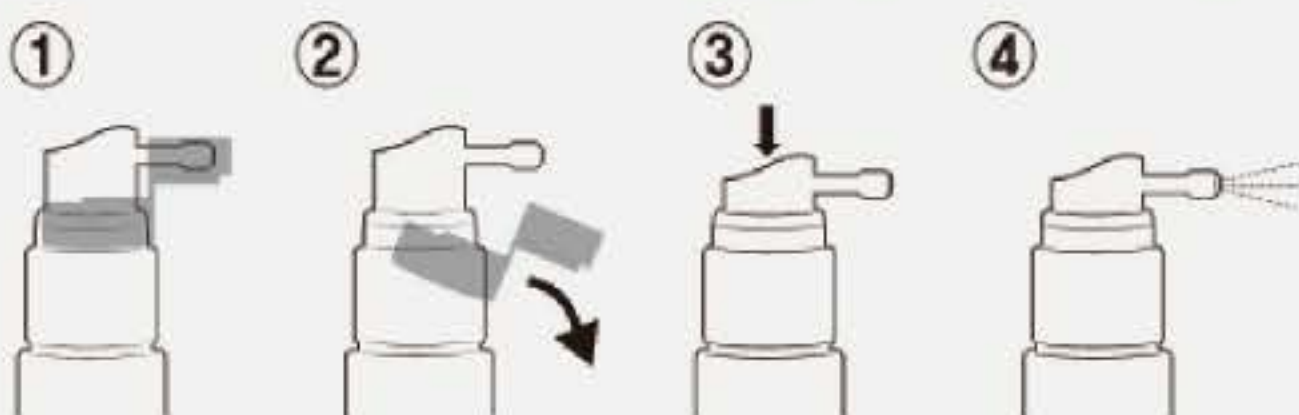

### <공통적용>

1. 한번 사용으로 5~7시간 효과를 유지할 수 있으며, 필요시 하루 3회 이상 사용해도 된다.
2. 필요시 거즈 등의 다른 드레싱제와 함께 사용할 수 있다.

## 폴리바이닐피롤리돈 관련 논문자료 내용 중 발췌

### 폴리바이닐피롤리돈(PVP)이란?

구강 진통제 제조에 사용되며 주로 상처치료 분야에서 다양한 용도로 사용되는 물질입니다.

### 1. 항균효과 (Journal of Biomedical Materials Research, 2008)

항균효과를 갖는 드레싱 소재를 제조하고, 이를 이용하여 상처감염 예방 및 치료에 적용 가능성을 연구 진행.

### 2. 조직치유 효과 (Journal of Wound Care, 2012)

조직치유 효과를 갖는 드레싱 소재를 제조하고 이를 이용한 상처 치료에 적용가능성을 연구 진행.

### 3. 약물 전달 효과 (Journal of Controlled Release, 2014)

약물 전달 효과를 갖는 드레싱 소재를 제조하고 이를 이용하여 상처치료 및 약물 전달에 적용 가능성을 연구 진행.

### 4. 보습효과

PVP는 구강 진통제의 주성분과 혼합하여 약물 안정성을 향상시켜 진통 억제에 도움이 된다.

### <구강창상>

1. 제품 스프레이 캡을 제거한다.
2. 통증 (염증), 상처 부위에 충분히 스프레이(분사)한다. (3-5회)
3. 구강의 염증 주변에 분사 후 최소 1분 이상 삼키지 말고 머금고 있어야 한다.
4. 하루 3회 혹은 필요시 제품을 3-5회 정도 구강 내에 스프레이 (분사) 한다.
5. 적용 후 최소 30분~60분간 음료 및 음식을 섭취하지 않는다.

### <일반창상>

1. 창상 부위와 제품의 거리를 약 10~15cm 정도 떨어진 곳에서 3회 스프레이(분사)하고, 하루 3회 사용한다.

# 뮤코라신 MOUTH ULCER SPRAY MUCORASIN

제 품 명	뮤코라신(MUCORASIN)
성 상	점착성의 투명한 겔 형태인 창상피복재
효 능 · 효 과	삼출액이 적은 창상의 보호를 위해 사용되는 스프레이형 점착성 투명 창상피복재이며, 구강점막이나 삼출액이 적은 상처 등에 도포 후 필름 형태로 보호막을 형성하여 창상을 보호한다.
저 장 방 법	실온에서 보관할 것. 고온다습한 장소에 보관하지 말 것. 직사광선을 피할 것.
포 장 단 위	9g, 15g / 1EA / 분사횟수 : 약 50회 ~ 60회
보 험 코 드	비급여 BM2000GH

## 뮤코라신 사용 병원 안내



이외 100여곳 이상의 대형병원에서 사용중입니다.

주식회사 이노트

Venture Enterprise  
벤처확인기업



상담문의

B2B서비스 / 제품OEM : 1688-2477 | 스마트스토어 : 이노메디샵

**031-446-0099** (본사) 이 노 트 : 경기도 안양시 만안구 안양로 336 금강빌딩 3층

제 조 소 : 경기도 의왕시 이미로 40, B동 506호

물류센터 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 645번길 72

이노트 홈페이지  
www.inot.co.kr

메디세일 B2B도매물  
www.medisale.co.kr

메디탑 병원전용물  
www.meditop.co.kr

